

Flexima[®]

Poslední generace stomických pomůcek
v jednodílné modelové řadě




Stoma Care

Koncentrace pomůcek pro potřeby stomiků

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Flexima® uzavřené sáčky

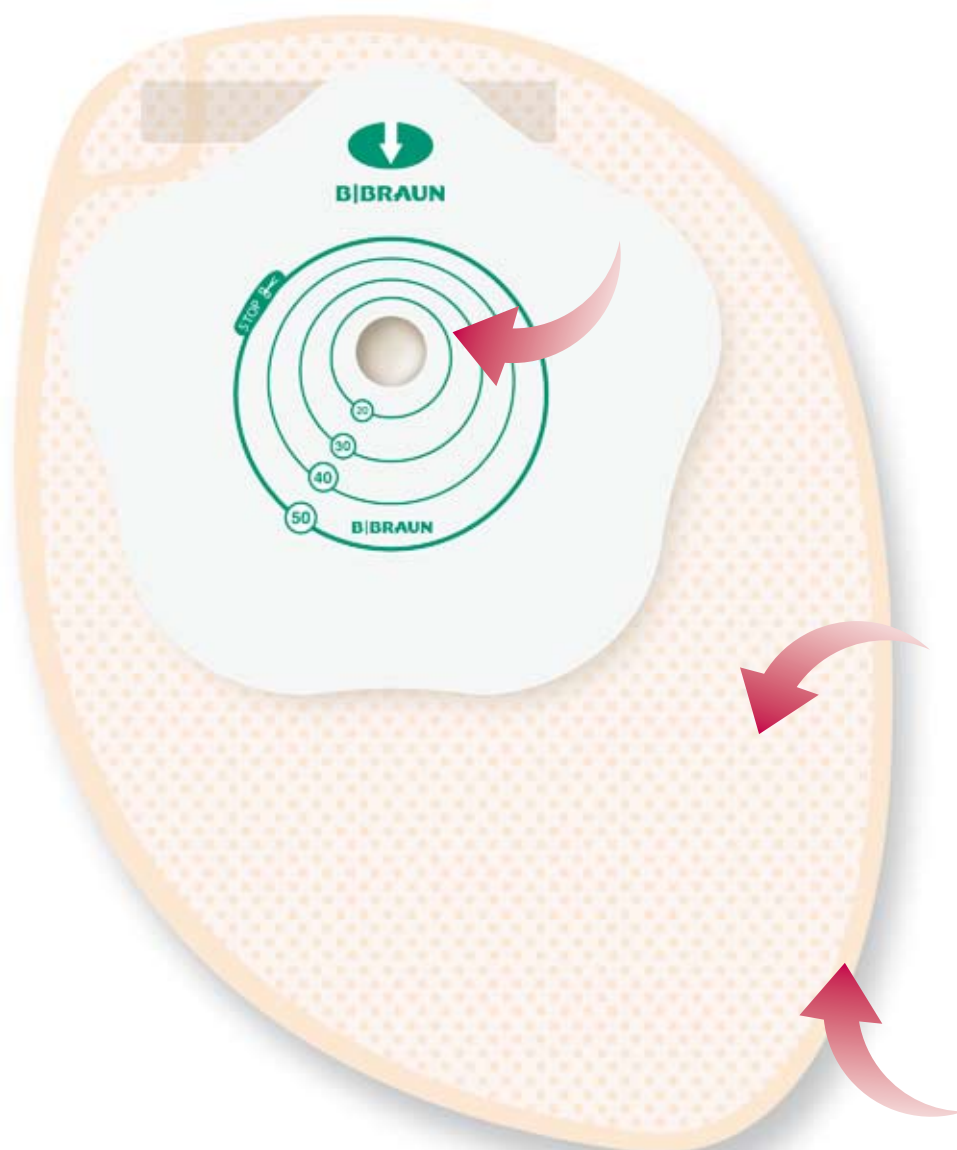

Zvýšená bezpečnost

- Hydrokoloidní lepicí podložka tvaru květu, která se přizpůsobuje přirozeným záhybům kůže
- Základní otvor posunut vzhůru
 - Více lepidla pod stomií na místech, kde je ho většinou třeba
 - Déletrvající ochrana

Nejvyšší diskrétnost s nehluknou plastovou fólií

Navržený pro pohodlí

- Velmi měkký materiál, netkaná textilie v kontaktu s kůží
- Ergonomický tvar sběrného sáčku
Přizpůsobuje se tříselné krajině

Optimalizovaná schopnost odstranění plynů a dezodorizace

Délka dráhy průchodu plynů




Chráněný odchod plynů

- Filtr je kompletně začleněn do sběrného sáčku
- Bez kontaktu s oděvem

Flexima® výpustné sáčky Flow Control*

Nové integrované měkké uzavírání s možností řízeného vypouštění stolice (Flow Control)

Krok 1.

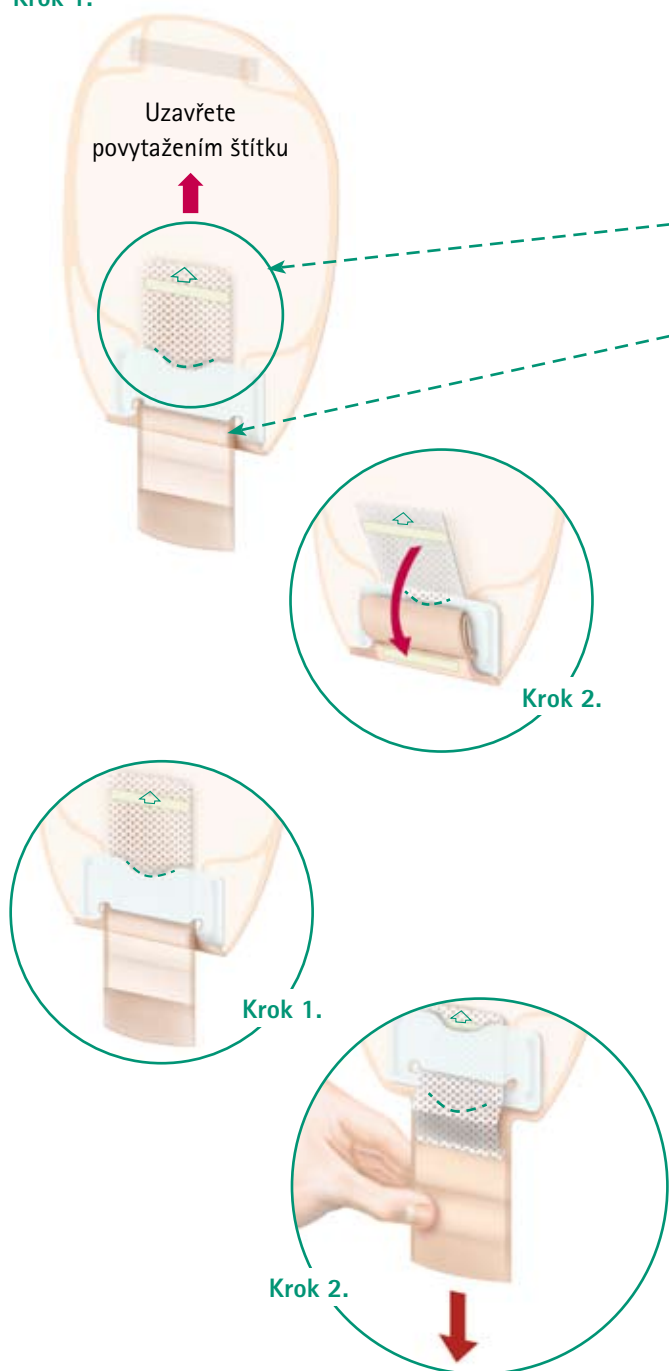

Zatáhněte, aby došlo k evakuaci stolice

Uzavírání

Krok 1. Uzavřete povytažením štítku

Symbole vytištěné na štítku slouží k vizuální kontrole bezpečného uzavření (šipka nahoře s tečkovanou čarou pod ní)

- Vodotěsný záhyb: umožňuje dokonalé zadržení tekutin, bez protékání
- Sáček není nutné při manipulaci pro jistotu přehýbat; tekutina nebude při vyprazdňování sáčku stékat zpět ke stomii

Krok 2. Výpustnou část přeložte a bezpečně ji uzavřete pomocí suchého zipu

- Plastický suchý zip a výpustnou část lze snadno očistit

Otevírání

Krok 1. Otevřete suchý zip a rozbalte výpustnou část

- Dokonce i při rozbalení výpustné části stolice volně nevytéká ven
- Při obsluze je možné zaujmout vhodnou pozici pro vyprázdnění sběrného sáčku

Krok 2. Zatáhněte za výpustnou část, aby došlo k evakuaci stolice

- Delší dráha evakuace → nižší riziko rozstříkávání

Flexima® Uro

Sáčky na moč s novým systémem vypouštění

Vždy o krok vpřed



Nový systém vypouštění



otevřené

Mimořádně bezpečný

Naprosto zřejmé pozice otevřeného/zavřeného



zavřené

Perfektní těsnost uzávěru

- Žádné zbylé kapky

Snadná manipulace

- Snadné ovládání
- Uzavření a otevření - jen na půl otáčky
- Zaoblený tvar






Snadné nasazení a sejmutí

Spolehlivost



- Velmi bezpečné a univerzální napojení
- Průměr výpustné části zvětšen o 20 %

Flexima® uzavřené sáčky

	Ø (mm)	Katalog. č.	Kód VZP
Uzavřený sáček běžový 30 ks v balení 	15 - 50*	044015U	0086609
	15 - 70*	044070U	0086615
	25	044025U	0086610
	30	044030U	0086611
	35	044035U	0086612
	40	044040U	0086613
	45	044045U	0086614
Uzavřený sáček průhledný 30 ks v balení 	15 - 50*	044115U	0086608
	15 - 70*	044170U	0086616
Mini uzavřený sáček běžový 30 ks v balení 	15 - 50*	044215U	0086617

* Upravitelný otvor

Flexima® výpustné sáčky

	Ø (mm)	Katalog. č.	Kód VZP
Výpustný sáček s integrovaným uzávěrem a filtrem, běžový 30 ks v balení 	Výpustný sáček Flow Control		
	15 - 60*	044715U	0086618
	25	044725U	0086619
	30	044730U	0086620
	35	044735U	0086621
	40	044740U	0086622
Výpustný sáček s integrovaným uzávěrem a filtrem, průhledný 30 ks v balení 	Výpustný sáček Flow Control		
	15 - 60*	044815U	0086623

Flexima® urostomické sáčky

	Ø (mm)	Katalog. č.	Kód VZP
Urostomický sáček 30 ks + 30 spojek v balení 	12 - 55*	044912U	0086624



B. Braun Medical s.r.o.
Divize OPM

V Parku 2335/20
CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111
Fax +420-271 091 112
e-mail: info@bbraun.cz
www.bbraun.cz