

# Discofix® C

Kohout, který nepraskne



IV příslušenství & filtry

Jedinečný přístup pro Vaše bezpečí

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Discofix® C

## – navržen pro konečky Vašich prstů ...



Jednoduše napojte



Zajistěte otočením



Pokud je kohout správně napojen, otáčí se 360° kolem vlastní osy



Discofix® C s PinPad – flexibilní fixace

### Výhody pro uživatele

- Odolný vůči agresivním účinkům farmak
- Těsnost napojení při dlouhodobé aplikaci
- Zabraňuje netěsnostem, kontaminaci a riziku vzduchové embolie
- Pohodlný přístup pro aplikaci a aspiraci
- Umožňuje zjistit správnou polohu hmatem
- Dlouhodobé použití (až 96 hodin)\*



### Oceňte pohodlný přístup

Otočná matice umožňuje rychlé a snadné napojení a uzamčení, které garantuje spolehlivě zabezpečený systém.

Je-li Discofix® C jednou napojen, může se stále otáčet kolem vlastní osy.

Můžete tedy během aplikace a aspirace při napojování stříkačky nebo infúzní linky otočit přístup směrem k sobě. Mimo jiné zabraňuje i nechtěnému rozpojení.



### Vnímejte hmatem správné nastavení

Při každém otočení ventilu o 45° cítíte lehké cvaknutí. Tento hmatový vjem Vám umožňuje zjistit, zda je ventil ve správné poloze. Přesné seřízení je rychlé a snadné.



\* v souladu s doporučeními CDC, RKI

# ...žádejte kohout, který nepraskne

IV příslušenství & filtry

## Discofix® C odolává agresivním účinkům farmak a vlivům časté manipulace

Tento unikátně vyvinutý kohout zajišťuje těsnost napojení, a to bez ohledu na použitý medikament a častou manipulaci.





Discofix® C eliminuje riziko náhlého prasknutí sestavy a možného nebezpečí kontaminace a vzduchové embolie v každodenní praxi.

### Discofix® C – srovnávací test s ostatními kohouty

Vynikající vlastnosti této nové generace kohoutů byly testovány nezávislou institucí a ověřeny profesionály ve zdravotnictví.

Všechny studie prokázaly, že většina vysoce koncentrovaných farmakologických přípravků nemá vliv na dlouhodobé použití kohoutů Discofix® C.

*Koncentrovaný roztok Pheniton Sodii může velmi rychle poškodit běžné kohouty vyrobené z plastu (např. polykarbonátu).*

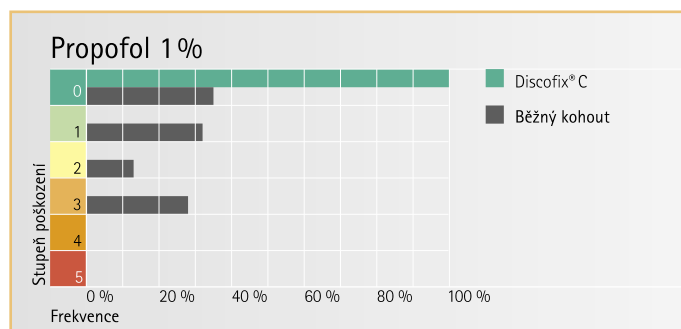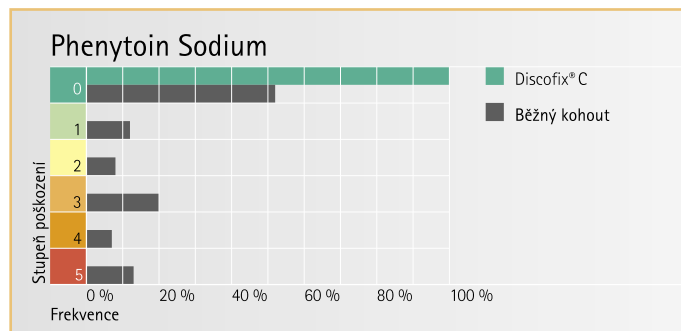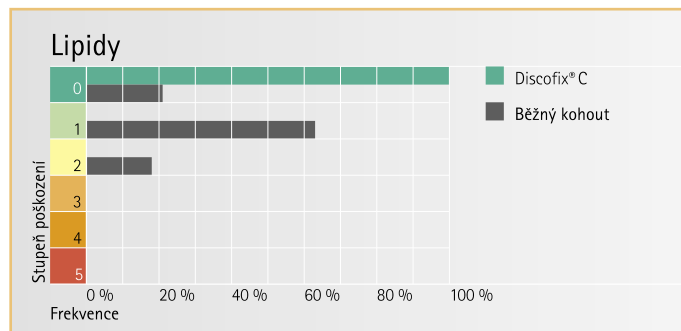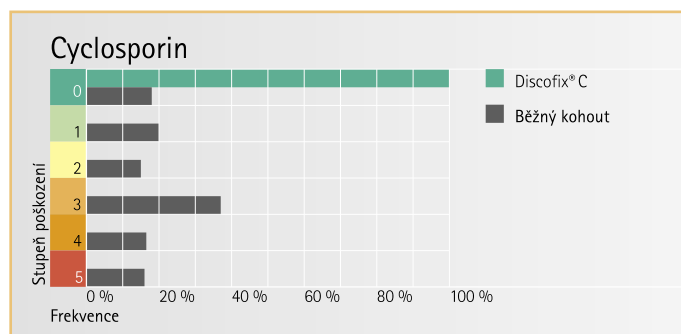


### Stupeň poškození:

**Stupeň 0:**  
Žádné poškození



**Stupeň 1:**  
Vlasové praskliny

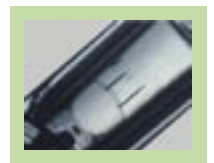

**Stupeň 2:**  
Četné vlasové praskliny



**Stupeň 3:**  
Vnitřní praskliny



**Stupeň 4:**  
Penetrující praskliny











**Stupeň 5:**  
Velmi závažné praskliny



# Discofix® C
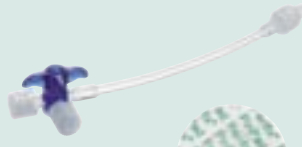
## IV příslušenství & filtry

Produkt	Typ	Kůsu v balení	Katalog. číslo
	Discofix® C modrý sterilní	100	16494C
	Discofix® C bílý sterilní	100	16495C
	Discofix® C červený sterilní	100	16496C
	Discofix® C žlutý sterilní	100	16497C
	Discofix® C modrý sterilní, s prodlužovací hadičkou – 10 cm	50	16500C
	Discofix® C modrý sterilní, s prodlužovací hadičkou – 25 cm	50	16520C
	PinPad klip pro snadnou fixaci kohoutů a soustav Discofix® C	25	4515510
	Discofix® C m/ž/č** sterilní, tříprvková soustava ventilů	50	16600C
	Discofix® C modrá sterilní, tříprvková soustava ventilů	50	16605C

\*\* modrá/žlutá/červená

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

**B. Braun Medical s.r.o.**  
Divize Hospital Care

Cigánkova 1861  
CZ-148 00 Praha 4  
Tel. +420-271 091 111  
Fax +420-271 091 112  
e-mail: [info@bbraun.cz](mailto:info@bbraun.cz)  
[www.bbraun.cz](http://www.bbraun.cz)